

## निजी उपयोग किट के लिए पैकेज इन्सर्ट

सैंपल संग्रह करने से पहले सभी पैकेज इन्सर्ट निर्देशों को पढ़ें।  
यदि परीक्षण ठीक से न किया गया तो परीक्षण के परिणाम अवैध हो सकते हैं।

### सैंपल निक्षेप


1. दिए गए संग्रह कागज़ को शौचालय के पात्र के अंदर पानी के ऊपर रखें।
2. संग्रह कागज़ के ऊपर मल त्यागें।
3. कागज़ पानी में डूबे इससे पहले और पानी मल से लगे इससे पहले मल का सैंपल ले लें।
4. फलश करें। संग्रह कागज़ जैविक रीति से नष्ट हो जाता है और सेप्टिक प्रणालियों को नुकसान नहीं करेगा।

### सैंपल संग्रह


1. सैंपलिंग बोतल पर सभी आवश्यक सूचनाएं लिखें।



घुमाकर और उठाकर हरे ढक्कन को खोलें।

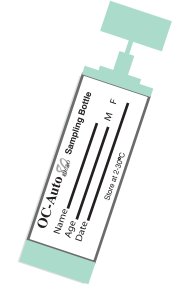


2. सैंपलिंग प्रोब से मल के नमूने की सतह को कुरेदें।

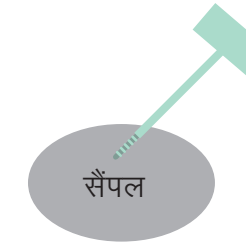

सैंपलिंग प्रोब के खांचेवाले भाग को मल सैंपल से पूरा ढंक दें।



3. सैंपलिंग प्रोब डालकर सैंपलिंग बोतल को बंद करें और हरे ढक्कन को कसकर लगा दें। दुबारा न खोलें।

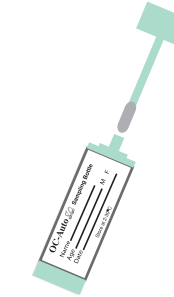

सैंपलिंग बोतल को दिए गए लिफाफे में रखकर अपने डाक्टर को या प्रयोगशाला को लौटाएं। कृपया उसे Polymedco को न भेजें।

